

Test nosečnosti

Enostaven

- Več kot 99-odstotno natančen od dne pričakovane menstruacije.
- **Pred opravljanjem testa natančno preberite to navodilo za uporabo.**

1 Opravite test

Testirate lahko kadarkoli v dnevu od dneva pričakovane menstruacije.

- Ko ste pripravljeni na testiranje, vzemite testno paličico iz zaščitne folije in snemite modri pokrovček. Testno paličico uporabite takoj.



2 Počakajte 2 minuti

- Modra črtica v kontrolnem okencu prikazuje, da je test deloval.
- Rezultat lahko odčitate po **2 minutah**.
- **Ne preberite rezultata, dokler se ne prikaže modra črtica.**
- Če se v kontrolnem okencu v **10 minutah** ne prikaže modra črtica, test ni deloval (glejte V6).



3 Odčitajte svoj rezultat

Zdaj lahko odčitate rezultat v okencu z rezultatom.



Če je vaš rezultat »Nosečnost«, glejte V9 v poglavju Vprašanja in odgovori.

Če je vaš rezultat »Ni nosečnosti«, glejte V10 v poglavju Vprašanja in odgovori.

POMEMBNO! Rezultat odčitajte v **2 - 10 minutah** po izvedbi testa. Morebitnih sprememb rezultata po tem času ne upoštevajte.


Testiranje v urinu

Test lahko opravite neposredno pod curkom urina ali z vzorcem urina, ki ga odzimate v čisto in suho posodico.

- Paličico obrnite s testno konico, ki spreminja barvo, navzdol in jo pridržite pod curkom urina ali v odvzetem vzorcu urina, kakor je prikazano, za **samo 5 sekund**.
- Testna konica, ki spreminja barvo, se hitro obarva rožnato, kar pomeni, da se urin absorbira. **Testno konico, ki spreminja barvo, morate držati v urinu 5 sekund.**
- Držite testno konico, ki spreminja barvo, navzdol ali pa položite paličico na ravno podlago, dokler se v kontrolnem okencu ne prikaže črtica.

Če želite, ponovno zaprite pokrovček.

Glejte V5, če se testna konica, ki spreminja barvo, ne obarva popolnoma rožnato.

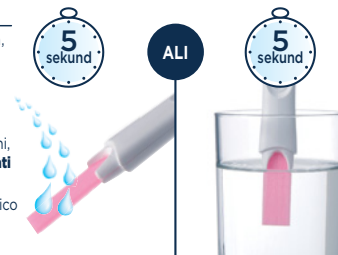

Ni pomembno, če je ena od črtic, ki sestavljata simbol »+«, svetlejša ali temnejša od druge - rezultat je »Nosečnost«:



Če še vedno dvomite v rezultat, za popolne podrobnosti glejte V7.

Vprašanja in odgovori

1 Kako natančen je test Clearblue?

Ta test je v laboratorijskih testih več kot 99-odstotno natančen od dne, pričakovane menstruacije.

2 Kako test Clearblue deluje?

Telo nosečnice proizvaja nosečniški hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Količina hormona hCG narašča z napredovanjem nosečnosti. Ta test lahko zazna majhne količine tega hormona v urinu od dne, ko pričakujete menstruacijo (občutljivost tega testa je 25 mIU/ml).

3 Kdaj lahko testiram s Clearblue Enostaven?

Testirate lahko kadarkoli v dnevu od dneva, ko pričakujete začetek menstruacije. Dan pričakovane menstruacije ugotovite tako, da izračunate običajno dolžino svojega menstrualnega cikla - preštejte število dni od prvega dne menstruacije do dne pred začetkom naslednje.

- Če je vaš menstrualni cikel nereden, upoštevajte najdaljši cikel v nekaj mesecih pred testiranjem.
- Pred opravljanjem testa ne pijte preveč tekočine.
- Če je rezultat »Ni nosečnosti«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

4 Ali lahko jemanje zdravil ali bolezni vplivajo na rezultat testa?

- Pred opravljanjem testa vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemljete.
 - Zdravila za plodnost, ki vsebujejo hCG, lahko privedejo do lažnega rezultata (ta zdravila za plodnost se navadno dajejo v obliki injekcij in testiranje prezgodaj po injiciranju lahko pokaže lažen rezultat »Nosečnost«).
 - Druga zdravila za plodnost (npr. klomifenjev citrat), zdravila za lajšanje bolečin in hormonska kontracepcijska sredstva (npr. kontracepcijske tablete) ne vplivajo na rezultat.
 - Če ste pred kratkim nehali uporabljati hormonsko kontracepcijo ali če se zdravite zaradi neplodnosti, npr. z klomifenjevim citratom, imate lahko neradne menstruacije. Zato lahko obstaja možnost, da opravljate test za ugotavljanje nosečnosti prezgodaj.
 - Če ste bili pred kratkim noseči (četudi otroka niste donosili), je posledica lahko lažen rezultat »Nosečnost«.
 - Do lažnega rezultata lahko privedejo tudi zunajmaternična nosečnost, ciste na jajčnikih, menopavza in v nekatere zelo redke bolezni.
 - Kljub rezultatu »Nosečnost« lahko pozneje ugotovite, da niste noseči, saj se lahko nosečnost konča po naravni poti.
- Če dobite nepričakovane rezultate, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.

5 Opravila sem test, vendar se testna konica, ki spreminja barvo, ni obarvala popolnoma rožnato. Kaj naj naredim?

Če se testna konica, ki spreminja barvo, ni obarvala popolnoma rožnato, morda niste uporabili dovolj urina. Test pa je deloval, če se je v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojavila modra črtica. Če se v kontrolnem okencu v 10 minutah od testiranja ne prikaže modra črtica, glejte V6.

6 Opravila sem test, vendar v kontrolnem okencu ni nobene modre črtice. Kaj naj naredim?

Če se v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu ne pojavi modra črtica, to pomeni, da test ni deloval. Razlogi so lahko naslednji: Potem ko ste testno paličico pomočili v urin, niste držali testne konice, ki spreminja barvo, obrnjene navzdol ali niste položili paličice na ravno podlago. Uporabili ste preveč ali premalo urina. Paličica mora biti v stiku z vzorcem urina 5 sekund. Testiranje ponovite z novo testno paličico in natančno upoštevajte navodila. Če želite, lahko vzorec urina odzimate v čisto in suho posodico ter vanj potopite testno konico, ki spreminja barvo, za samo 5 sekund.

7 Kaj storiti, če nisem prepričana v rezultat?

- Za rezultat »Nosečnost« se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica in »+«.
- Videz simbola »+« v okencu z rezultatom je lahko različen, vendar morajo biti črtici, ki sestavljata simbol »+«, in črtica v kontrolnem okencu podobne širine (glejte slike A-C).

Slika A

To je verjetneje, če ste noseči in opravljate test več kot nekaj dni po pričakovani menstruaciji, ker so ravni hormona hCG višje.

Slika B

To ni neobičajno, če ste noseči in opravljate test približno na dan pričakovane menstruacije, ker so ravni hormona hCG lahko še vedno sorazmerno nizke.

Slika C

To vseeno pomeni, da je rezultat »Nosečnost«. Če še vedno dvomite v rezultat, pred ponovnim testiranjem počakajte najmanj 3 dni in natančno upoštevajte navodila.

- Če je rezultat »Ni nosečnosti«, se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »-«. Če je rezultat »Ni nosečnosti«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

8 Kako dolgo traja rezultat?

Rezultat lahko odčitate kadarkoli do 10 minut po tem, ko ste opravili test. Morebitnih sprememb rezultata po preteku 10 minut ne upoštevajte.

9 Test prikazuje rezultat »Nosečnost«. Kaj naj naredim?

Če je test pokazal, da ste noseči, morate obiskati svojega zdravnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih ukrepih.

10 Test je pokazal rezultat »Ni nosečnosti«. Kaj naj naredim?

Morda niste noseči, morda raven nosečnega hormona še ni dovolj visoka, da bi ga test lahko zaznal, ali pa ste narobe izračunali dan pričakovane menstruacije. Če menstruacija zaostaja, znova preverite čez 3 dni, če še vedno sumite na nosečnost. Če vam tudi drugi test pokaže, da niste noseči, menstruacija pa vam še vedno zamuja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Za domačo uporabo. Za *in vitro* diagnostično uporabo. Ni za interno uporabo. Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri 2-30 °C.

Če je test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se test ogreje na sobno temperaturo.

Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija testa poškodovana. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.

Zavržite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.

	Proizvajalec		Ne uporabite ponovno.
	Številka serije		<i>In vitro</i> diagnostični medicinski pripomoček
	Rok uporabnosti		Temperaturna meja 2 °C-30 °C

www.clearblue.com

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, HR-10000 Zagreb, Hrvaška

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica
Clearblue je blagovna znamka SPD.
© 2019 SPD. Vse pravice pridržane.