

Test nosečnosti

Za zelo zgodnje testiranje



Za samotestiranje.
Pred testiranjem natančno preberite ta navodila.

Test lahko izvedete do **6 dni pred** zamujenim prvim dnevom menstruacije!

Če testirate prvi urin zgodaj v dnevu Sicer lahko test izvedete kadar koli v dnevu

Pred testiranjem ne pijte veliko tekočine

Rezultat odčitajte najkasneje v 10 minutah

1 Opravite test

Test vzemite iz folije, snemite pokrovček in test takoj uporabite. Testno konjico, ki spremeni barvo, postavite:



ali



POMEMBNO: Konjico popolnoma potopite, kot je prikazano

POMEMBNO: Konjica, ki spremeni barvo, se takoj obarva rožnato, kar označuje, da je začela vpijati urin. Začnite meriti čas takoj, ko konjica, ki spremeni barvo, postane rožnata.

Ponovno namestite pokrovček in položite testno paličico na ravno podlago. Če konjica ne postane popolnoma rožnata, glejte »Napake pri testiranju«.

2 Počakajte



Vrstica v kontrolnem okencu se lahko začne pojavljati hitro, vendar morate **POČAKATI 3 POLNE MINUTE**, preden preberete rezultat.

Če se modre črte ne pojavijo, glejte »Napake pri testiranju«.

3 Rezultati

Nosečnost - če je rezultat testa, da ste noseči, obiščite svojega zdravnika.

Slika A

Slika B

Slika C



Okence z rezultati Kontrolno okence

Ni nosečnosti (glejte vprašanje 2).



Če niste prepričani o svojem rezultatu, glejte vprašanje 6.

ČE VIDITE DVE ČRTI, STE NOSEČI. NI POMEMBNO, ALI STA ČRTI TEMNI ALI SVETLI.

V kontrolnem okencu mora biti modra črta, da bo vaš rezultat veljaven. Če črte ni, glejte »Napake pri testiranju«. **POMEMBNO!** Rezultat odčitajte najkasneje v **10 minutah** po testiranju. Morebitnih sprememb rezultata po preteku tega časa ne upoštevajte.

? Vprašanja in odgovori

- Test je pokazal, da sem noseča. Kaj naj naredim?** Obiščite svojega zdravnika, ki vam bo svetoval, kako naprej. Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat, vendar kasneje ugotovite, da niste noseči (glejte vprašanje 7).
- Test je pokazal, da nisem noseča. Kaj to pomeni?** Morda niste noseči ali pa raven nosečniškega hormona še ni dovolj visoka, da bi jo test lahko zaznal. Test ponovite čez tri dni. Če vam ta test pokaže, da niste noseči, in vam menstruacija zamuja, obiščite svojega zdravnika.
- Kako kmalu lahko opravi test?** Ta test lahko uporabite največ 6 dni pred zamujenim prvim dnevom menstruacije (5 dni pred pričakovano menstruacijo). Ker pa se raven hormonov med ženskami razlikujejo in je v zgodnji nosečnosti lahko raven hormonov zelo nizka, ste lahko noseči, a bo kljub temu rezultat negativen. Spodnja tabela prikazuje odstotek nosečnosti, ki so bile zaznane pri laboratorijskem testiranju z vzorci urina v zgodnji nosečnosti:

Dni pred izostankom menstruacije	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Zaznane nosečnosti	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

- Kako deluje test Clearblue?** Test v urinu zazna nosečniški hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Preskusna občutljivost je 10 mIE/ml. V laboratorijskih testih se je pokazalo, da je več kot 99% točen od dneva, ko pričakujete menstruacijo.
- Ali lahko jemanje zdravil ali zdravstveno stanje vpliva na rezultat testa?** Pred testiranjem vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemljete.

Zdravila, ki vsebujejo hCG, in nekatera redka zdravstvena stanja lahko povzročijo lažno pozitivne rezultate. Zunajmaternična ali nepravna nosečnost, tudi če je bila končana pred porodom, lahko pokaže napačen rezultat. Če ste v menopavzi ali se ji približujete, lahko dobite lažen rezultat nosečnosti, čeprav niste noseči.

Hormonsko zdravljenje s klomifenijevim citratom, zdravila za lajšanje bolečin, alkohol, antibiotiki ali kontracepcijske tablete **NE** bi smeli vplivati na rezultat testa. Če je rezultat nepričakovan, se o tem pogovorite s svojim zdravnikom.

- Kaj, če nisem prepričana o rezultatu?** Če v 10 minutah po testiranju opazite dve modri črti, ki kažeta »Nosečnost«, ni pomembno, kako svetle ali temne so črte.

Rezultat »Nosečnost«:

Slika A Ta rezultat je bolj verjeten, če opravite test, preden pričakujete menstruacijo, ko so lahko raveni hCG relativno nizke.

Slika B Tak rezultat se lahko pokaže, če opravite test okrog dneva, ko pričakujete menstruacijo, saj so raveni hCG lahko še vedno relativno nizke.

Slika C Tak rezultat se lahko pokaže, če opravite test več kot nekaj dni po tem, ko bi naj dobili menstruacijo, saj so raveni hCG takrat višje.

Če še vedno dvomite v rezultat, počakajte vsaj 3 dni, preden ponovno opravite test in natančno upoštevajte navodila.

- Opravila sem test in dobila rezultat »Nosečnost«; po vnovičnem testiranju pa je bil rezultat »Ni nosečnosti« ali pa sem dobila menstruacijo. Kaj to pomeni?** Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat in kasneje ugotovite, da niste več noseči. To imenujemo »zgodnja izguba nosečnosti«, kar ni nič nenavadnega in se pojavi pri približno 1 od 4 nosečnosti. Večina žensk lahko po tem povrnemo normalno zanosi in dokonča nosečnost.

www.clearblue.com

Navodila za uporabo testa Clearblue Ultra Early z napisom »CB14« na ovojnicini. Za samotestiranje doma. Samo za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo. Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri 2-30 °C. Če je bil test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabite, če je zaščitna folija poškodovana. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Zavržite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Pripomočka ne razstavljajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč. Vsako poškodbo, ki jo povzroči uporaba tega izdelka, sporočite družbi Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Svica. Clearblue je blagovna znamka SPD. © 2021 SPD. Vse pravice pridržane.

Če potrebujete informacije o izdelku, se obrnite na službo za podporo strankam na spodnjem naslovu:

✉ Distribucija v SR: Glynn Brothers Chemicals Slovakia spol. s r.o., Slovensko

LOT	Številka serije	IVD	Medicinski pripomoček za diagnostiko <i>in vitro</i>	Proizvajalec
Rok uporabnosti		Temperatura omejitvev	2-30 °C	Ne uporabite ponovno

79 % rezultatov nosečnosti je mogoče odkriti 6 dni pred zamujenim prvim dnevom menstruacije (5 dni pred pričakovano menstruacijo).

! Napake pri testu

Konjica, ki spremeni barvo, ne postane popolnoma rožnata.

Morda niste uporabili dovolj urina. Vendar pa ste lahko prepričani, da je test deloval, če se kontrolna črta pojavi prej kot v 10 minutah po izvedbi testa.

V 10 minutah po testiranju se v kontrolnem okencu ne pojavi modra črta.

Test najverjetneje ni deloval, ker je bilo uporabljeno preveč ali premalo urina. Ponovno preskusite z novim testom, pri čemer natančno upoštevajte navodila.

