

Test nosečnosti

Hitro odkrijte

- Več kot 99-odstotno natančen od dne pričakovane menstruacije.
- Pred opravljanjem testa natančno preberite ta navodila za uporabo.

1 Preden začnete

Morda vam bo koristilo, če imate med opravljanjem testa v bližini uro. Testirate lahko kadar koli v dnevu od dneva pričakovane menstruacije.



2 Opravite test

Ko ste pripravljeni na testiranje, odstranite zaščitno folijo in snemite pokrovček. Testno paličico uporabite takoj.

Test lahko opravite neposredno pod curkom urina ali z vzorcem urina, ki ga odzimate v čisto in suho posodico.

- Paličico obrnite tako, da je testna konica, ki spremeni barvo, obrnjena navzdol, in jo pridržite pod curkom urina ali v odzvetem vzorcu urina, kakor je prikazano, za celih 5 sekund.
- Konica paličice, ki spremeni barvo, se takoj obarva rožnato, kar pomeni, da se urin absorbira. **Testno konico, ki spremeni barvo, morate držati v urinu celih 5 sekund.**



- Testno konico, ki spremeni barvo, držite obrnjeno navzdol ali pa položite paličico na ravno podlago, dokler niste pripravljeni prebrati rezultata in dokler se v kontrolnem okencu ne prikaže modra črtica.
- Če želite, ponovno zaprite pokrovček.
- Če se konica, ki spreminja barvo, ne obarva popolnoma rožnato, glejte V5.



POČAKAJTE 3 MINUTE.

Ko test začne delovati, boste videli, kako nastaja modra črtica ali črtici.

3 Preberite svoj rezultat


Zdaj lahko preberete rezultat v okencu z rezultatom.

Ko preberete rezultat, mora biti v kontrolnem okencu modra črtica. Ta črtica pomeni, da je test deloval.

Rezultat »Nosečnost« se lahko pojavi po 1 minuti, če testirate od dne izostanka menstruacije (to je dan po pričakovani menstruaciji).

Na potrditev rezultata »Ni nosečnosti« morate počakati polne 3 minute (glejte V8).

Če v kontrolnem okencu ne vidite modre črtice, test ni deloval (glejte V6).

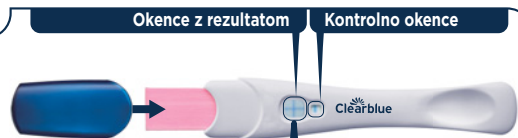

Ni nosečnosti

Če je vaš rezultat »Ni nosečnosti«, glejte V10.

Nosečnost

- Če je vaš rezultat »Nosečnost«, glejte V11.
- Če še vedno dvomite v rezultat, glejte V7.

Ni pomembno, če je ena od črtic, ki sestavljata simbol »+«, svetlejša ali temnejša od druge; rezultat je »Nosečnost«.

POMEMBNO! Rezultat preberite v 10 minutah po testiranju. Morebitnih sprememb rezultata po tem času ne upoštevajte.

Vprašanja in odgovori

1 Kako natančen je test Clearblue?

Clearblue je v laboratorijskih testih več kot 99-odstotno natančen od dne pričakovane menstruacije.

2 Kako test Clearblue deluje?

Telo nosečnice proizvaja nosečnostni hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Količina hormona hCG narašča z napredovanjem nosečnosti. Clearblue Hitro odkritje lahko zazna zelo majhne količine tega hormona v urinu (občutljivost tega testa je 25 mIU/ml).

3 Nisem prepričana, kdaj pričakujem naslednjo menstruacijo. Kako vam, ali testiram ob pravem času?

Dan pričakovane menstruacije ugotovite tako, da izračunate običajno dolžino svojega menstrualnega cikla – preštejte število dni od prvega dne menstruacije do dne pred začetkom naslednje.

- Če je vaš menstrualni cikel nereden, upoštevajte najdaljši cikel v nekaj mesecih pred testiranjem.
- Če je rezultat »Ni nosečnosti«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

4 Ali lahko jemanje zdravil ali bolezni vplivajo na rezultat testa?

- Pred opravljanjem testa vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemljete.
- Zdravila za plodnost, ki vsebujejo hCG, lahko privedejo do zavajajočega rezultata (ta zdravila za plodnost se navadno dajejo v obliki injekcij in testiranje prezgodaj po injekciji lahko pokaže lažen rezultat »Nosečnost«).
- Druga zdravila za plodnost (npr. klomifencitrat), zdravila za lajšanje bolečin in hormonska kontracepcijska sredstva (npr. kontracepcijske tablete) ne vplivajo na rezultat.
- Če ste pred kratkim nehali uporabljati hormonsko kontracepcijo ali če se zdravite zaradi neplodnosti, npr. s klomifencitratom, imate lahko neredne menstruacije. Zato se lahko zgodi, da opravite test za ugotavljanje nosečnosti prezgodaj.
- Če ste bili pred kratkim noseči (četudi otroka niste donosili), je posledica lahko lažen rezultat »Nosečnost«.
- Do zavajajočih rezultatov lahko privedejo tudi zunajmaternična nosečnost, ciste na jajčnikih, menopavza in nekatere zelo redke bolezni.
- Kljub rezultatu »Nosečnost« lahko pozneje ugotovite, da niste noseči, saj se lahko nosečnost v zgodnji fazi konča po naravni poti. Če dobite nepričakovane rezultate, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.

5 Opravila sem test nosečnosti, vendar se testna konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato. Kaj naj naredim?

Če se testna konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato, morda niste uporabili dovolj urina. Test pa je deloval, če se je v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojavila modra črtica. Če se v kontrolnem okencu v 10 minutah od testiranja ne prikaže modra črtica, glejte V6.

6 Opravila sem test nosečnosti, vendar v kontrolnem okencu ni nobene modre črtice. Kaj naj naredim?

Če se v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu ne pojavi modra črtica, to pomeni, da test ni deloval. Razlogi so lahko naslednji:

- Potem ko ste testno paličico pomočili v urin, niste držali testne konice, ki spremeni barvo, obrnjene navzdol ali niste položili paličice na ravno podlago.
- Uporabili ste preveč ali premalo urina. **Paličica mora biti v stiku z vzorcem urina 5 sekund.**

Testiranje ponovite z novo testno paličico in natančno upoštevajte navodila. Če želite, lahko vzorec urina odzimate v čisto in suho posodico ter vanj za 5 sekund potopite samo testno konico, ki spremeni barvo.

7 Kaj storiti, če nisem prepričana v rezultat?

• Za rezultat »Nosečnost« se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »+«.

Videz simbola »+« v okencu z rezultatom je lahko različen, vendar morajo biti črtici, ki sestavljata simbol »+«, in črtica v kontrolnem okencu podobne širine (glejte slike A-C).

Slika A

To je verjetneje, če ste noseči in opravljate test več kot nekaj dni po izostali menstruaciji, ker so ravni hormona hCG višje.

Slika B

To ni neobičajno, če ste noseči in opravljate test približno na dan izostale menstruacije, ker so ravni hormona hCG lahko še vedno sorazmerno nizke.

Slika C

Tudi blede črtica pomeni, da je rezultat »Nosečnost«.

Če še vedno dvomite v rezultat, počakajte najmanj 3 dni pred ponovnim testiranjem in natančno upoštevajte navodila za uporabo.

- Če je rezultat »Ni nosečnosti«, se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »-« (minus). Če je rezultat »Ni nosečnosti«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

8 Kdaj lahko preberem rezultat?

Rezultat »Nosečnost« se lahko pojavi že po 1 minuti, če testirate od dne izostanka menstruacije (to je dan po pričakovani menstruaciji). Prepričajte se, da je v kontrolnem okencu prisotna modra črtica, preden preberete rezultat. Na potrditev rezultata »Ni nosečnosti« morate počakati 3 minute. Če se v kontrolnem okencu v 10 minutah ne prikaže modra črtica, test ni deloval (glejte V6).

9 Kako dolgo traja rezultat?

Rezultat lahko preberete kadar koli v roku 3 do 10 minut. Morebitnih sprememb rezultata po preteku 10 minut ne upoštevajte.

10 Test je pokazal rezultat »Ni nosečnosti«. Kaj naj naredim?

Morda niste noseči, morda raven nosečnostnega hormona še ni dovolj visok, da bi ga test lahko zaznal, ali pa ste narobe izračunali dan pričakovane menstruacije.

- Če ste test opravili zgodaj, ga ponovite ob pričakovani menstruaciji.
- Če vaša menstruacija zamuja, ponovite test po 3 dneh. Če vam tudi drugi test pokaže, da niste noseči, menstruacije pa še vedno ni, se posvetujte s svojim zdravnikom.

11 Test prikazuje rezultat »Nosečnost«. Kaj naj naredim?

Če je test pokazal, da ste noseči, morate obiskati svojega zdravnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih ukrepih.

Če vas zanimajo naslednji koraki, informacije in splošni nasveti v zvezi z nosečnostjo, obiščite naše spletno mesto na naslovu: www.clearblue.com

Za samotestiranje doma. Za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri 2-30 °C. Če je test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se test ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija testa poškodovana. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Odstranite skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Pripomočka ne razstavljajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč.

	Proizvajalec		Ne uporabite ponovno.
	Številka serije		Medicinski pripomoček za diagnostično uporabo <i>in vitro</i>
	Rok uporabnosti		Temperaturna omejitev 2°C-30 °C

www.clearblue.com

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, HR-10000 Zagreb, Hrvaska.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica. Clearblue je blagovna znamka SPD. © 2019 SPD. Vse pravice pridržane.