

Test nosečnosti

Hitro odkritje

Ta izdelek je neavtomatizirana naprava za samostestiranje na domu za kvalitativno odkrivanje humanega horionskega gonadotropina (hCG) v ženskem urinu za odkrivanje nosečnosti.¹ Namenjeno za uporabo od 4 dni pred pričakovano menstruacijo.²

1 Opravite test

Potrebni materiali, ki niso priloženi: čista, suha posodica in štoparica. Odstranite folijski ovitek, snemite pokrovček in takoj uporabite.



v curek urina za

5 sekund

ali



v odvzet vzorec urina za

5 sekund

POMEMBNO: Konico popolnoma potopite, kot je prikazano

Več kot 99-% natančen
od dneva, ko pričakujete menstruacijo

Za odčitavanje enostavni rezultati

Pred testiranjem ne pijte veliko tekočine

Rezultate odčitajte najkasneje v 10 minutah

10 minutah

Za samostestiranje. Pred testiranjem natančno preberite ta navodila za uporabo.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Navodila za uporabo naprave z napisom »CB11012« na ovojnini. Za samostestiranje doma. Samo za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo. Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri temperaturi 2-30 °C. Če je bil test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabite, če je folijski ovitek poškodovan. Po odpiranju folije, takoj uporabite. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Pripomočka ne razstavljajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč. Vsako poškodbo, ki jo povzroči uporaba tega izdelka, sporočite družbi Clearblue.

2 Počakajte



- Pozitiven »+« rezultat testa nosečnosti se lahko prikaže že v 1 minuti, če se testirate od izostanka menstruacije (dan po pričakovani menstruaciji).
- Da potrdite rezultat »Ni nosečnosti« -»-« morate počakati 3 minute. Če se modre črte ne pojavijo, glejte »Napake pri testiranju«.

3 Rezultati

Nosečnost - če je rezultat testa, da ste noseči, obiščite svojega zdravnika. (glejte vprašanje 1)

Slika A



Okence z rezultatom Kontrolno okence

Slika B



V kontrolnem okencu mora biti modra črta, da bo vaš rezultat veljaven. Če črtice ni, glejte »Napake pri testiranju«. **POMEMBNO!** Rezultat odčitajte najkasneje v 10 minutah po testiranju. Morebitnih sprememb rezultata po preteku tega časa ne upoštevajte.

Slika C



Ni nosečnosti (glejte vprašanje 2)



Če niste prepričani o svojem rezultatu, glejte vprašanje 6.

? Vprašanja in odgovori

- Test je pokazal, da sem noseča. Kaj naj naredim?** Obiščite svojega zdravnika, ki vam bo svetoval, kako naprej. Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat, vendar kasneje ugotovite, da niste več noseči (glejte vprašanje 7).
- Test je pokazal Ni nosečnosti. Kaj to pomeni?** Morda niste noseči ali pa raven nosečnostinega hormona še ni dovolj visoka, da bi jo test zaznal. Test ponovite čez tri dni. Če vam ta test pokaže rezultat »Ni nosečnosti« in vam menstruacija zamuja, obiščite svojega zdravnika.
- Nisem prepričana, kdaj pričakujem naslednjo menstruacijo. Kako vem, da testiram ob pravem času?** Dan pričakovane menstruacije ugotovite tako, da izračunate običajno dolžino menstrualnega cikla - preštejte število dni od prvega dne menstruacije do dne, ko se začne naslednja menstruacija. Če imate neredne cikle, upoštevajte najdaljši cikel v nekaj mesecih pred testiranjem.
- Kako test Clearblue deluje?** Zazna hCG v vzorcu urina po uporabi. Vizualni rezultati kažejo, ali je bil hCG zaznan več kot 99-% natančno od dneva pričakovane menstruacije.
- Ali lahko jemanje zdravil ali zdravstveno stanje vpliva na rezultate?** Pred testiranjem vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemljete. Zdravila, ki vsebujejo hCG, in nekatera redka zdravstvena stanja lahko povzročijo lažno pozitivne rezultate. Zunajmaternična ali nedavna nosečnost, tudi če je bila končana pred porodom, lahko pokaže napačen rezultat. Če ste v menopavzi ali se ji približujete, lahko dobite lažen rezultat nosečnosti, čeprav niste noseči. Hormonsko zdravljenje s klomifenijemv citratom, zdravila za lajšanje bolečin, alkohol, antibiotiki ali kontracepcijske tablete **NE** bi smeli vplivati na rezultat testa. Če dobite nepričakovane rezultate, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.
- Kaj storiti, če nisem prepričana v rezultat?** Za rezultat »Nosečnost« se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črta in »+« v okencu z rezultatom. **Rezultat »Nosečnost«**
Slika A: To je verjetneje, če ste noseči in opravljate test več kot nekaj dni po izostanku menstruacije, ker so ravni hCG višje.
Slika B: Tak rezultat se lahko pokaže, če opravite test okrog dneva, ko pričakujete menstruacijo, saj so ravni hCG lahko še vedno relativno nizke.
Slika C: To vseeno pomeni, da je rezultat nosečnost.
Ni pomembno, če je ena od črtic, ki sestavljata simbol »+«, svetlejša ali temnejša od druge; rezultat je »Nosečnost«. Če je rezultat »Ni nosečnosti«, se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črta, v okencu z rezultatom pa simbol »-« (minus). Če še vedno dvomite v rezultat, pred ponovnim testiranjem počakajte najmanj 3 dni in natančno upoštevajte navodila.
- Opravila sem test in dobila rezultat »Nosečnost«; po vnovičnem testiranju pa je bil rezultat »Ni nosečnosti« ali pa sem dobila menstruacijo. Kaj to pomeni?** Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat in kasneje ugotovite, da niste več noseči. To se lahko zgodi zaradi izgube plodu v zgodnji nosečnosti, kar ni nič nenavadnega in se pojavi pri približno 1 od 4 nosečnosti. Večina žensk lahko kasneje povsem normalno zanosi in dokonča nosečnost.
- Ali bi morala storiti kaj posebnega, če načrtujem zanositev?** Preden poskusite zanositi, se pogovorite s svojim zdravnikom. Mnogi zdravniki svetujejo, da je koristno uživanje folne kisline ali prenatalnih vitaminskih dodatkov, izogibanje alkoholu, opustitev kajenja in poskušanje vzdrževanja zdrave telesne teže. Razmislite tudi o uporabi ovulacijskega testa za določitev vaših najplodnejših dni. Clearblue ponuja vrsto izdelkov, ki pomagajo izboljšati vaše možnosti za zanositev.

! Napake pri testu

Konica, ki spremeni barvo, ni postala popolnoma rožnata. Morda niste uporabili dovolj urina. Vendar pa ste lahko prepričani, da je test deloval, če se kontrolna črta pojavi prej kot v 10 minutah po izvedbi testa.

V 10 minutah po testiranju se v kontrolnem okencu ne pojavi modra črta. Test najverjetneje ni deloval, ker je bilo uporabljeno preveč ali premalo urina. Ponovno prekusite z novim testom, pri čemer natančno upoštevajte navodila.

Okence z rezultatom Kontrolno okence



www.clearblue.com

Značilnosti delovanja

Klinična učinkovitost:

Klinično testiranje učinkovitosti je pokazalo, da je pripomoček >99-% natančen pri določanju stanja nosečnosti od dneva pričakovane menstruacije.

- Pripomoček je bil >99-% natančen v rokah laičnih uporabnikov v primerjavi s stanjem nosečnosti (testirano s 120 ženskami).
- V študiji, v kateri so testirali 600 vzorcev, je bil pripomoček od dneva pričakovane menstruacije > 99-% natančen.
- Klinično testiranje specifičnosti z vzorci pred menopavzo, okrog menopavze in po menopavzi (600 vzorcev) je potrdilo >99-% specifičnost.

IVD	In vitro diagnostični medicinski pripomoček	LOT	Številka serije
	Proizvajalec		Rok uporabnosti
	Ne uporabite ponovno.		Temperaturna meja 2-30 °C
EC REP	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti		

Analitična učinkovitost:

Analitična učinkovitost je bila ugotovljena s testiranjem pripomočka s potencialno motečimi ali navzkrižno reagirajočimi snovmi. Rezultati so potrdili, da visoke koncentracije le-teh ne vplivajo na delovanje pripomočka. Prav tako ne vplivajo visoke ravni beta jedrnega hCG fragmenta, zelo visoke ravni nedotaknjene hCG, vrste specifičnih gravitacij ali pH urina. Studija natančnosti je pokazala, da je analitska občutljivost pripomočka 25 mIU/mL.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica.
 PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.

Literatura

¹Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156-60.
²Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.
Clearblue je blagovna znamka SPD.
© 2023 SPD. Vse pravice pridržane.